

WIDEX BEYOND TILSLUTNINGSGUIDE TIL ANDROID

KONTROLLÉR SOFTWARE VERSION

For at være kompatibel med Beyond app'en og Beyond høreapparaterne skal softwaren på din Android telefon være **version 6.0.1 eller nyere**.


Det kan du nemt tjekke ved at følge disse fire enkle trin.

Vær i øvrigt opmærksom på, at 'location' skal være aktiveret på din telefon, for at app'en kan fungere.


1. Gå ind i 'Indstillinger'




2. Tryk på menupunktet 'Om enheden' *

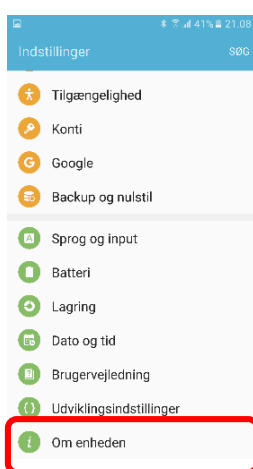


3. Tryk på menupunktet 'Softwareinfo'

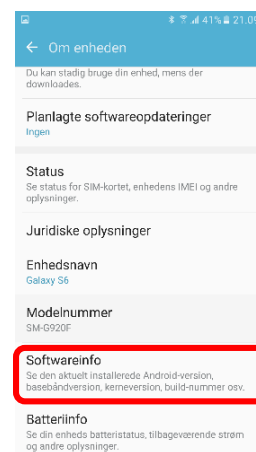

4. Tjek tallet under menupunktet 'Android-version'.
Der skal stå **6.0.1 eller højere**.

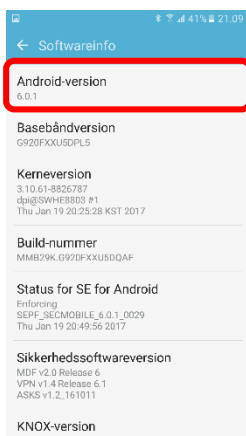

* **TIP!** I menuen 'Om enheden' kan du vælge at tænde for funktionen 'Download opdateringer automatisk', så sikrer du at softwaren altid er den seneste version.


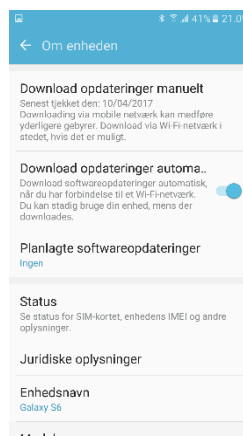


WIDEX BEYOND TILSLUTNINGSGUIDE TIL ANDROID



FORBIND DINE BEYOND HØREAPPARATER VIA BLUETOOTH

Inden du kan gå videre med at bruge Beyond app'en skal du sørge for at forbinde/parre dine høreapparater med telefonen via Bluetooth signalet.

1. Gå ind i 'Indstillinger'
2. Tryk på menupunktet 'Bluetooth'
3. Sørg for at Bluetooth er slået til

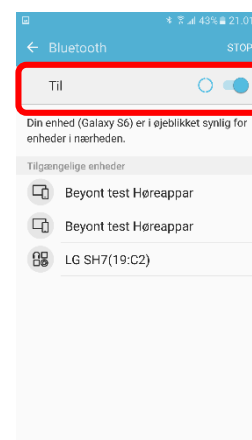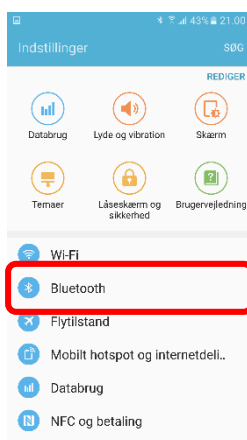

4. Under 'Tilgængelige enheder' bør du nu kunne se et H+V Beyond høreapparat. For at forbinde/parre skal du trykke på både H og V apparatet.
5. Når telefon og høreapparaterne er parrede, fremgår både H+V af 'parrede apparater'.

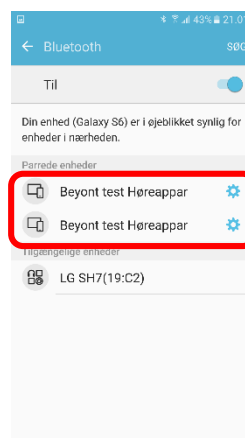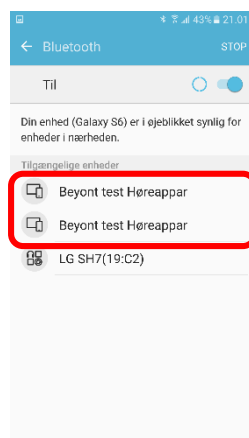


WIDEX BEYOND TILSLUTNINGSGUIDE TIL ANDROID


KOM I GANG MED BEYOND APP'EN

Når softwaren er opdateret og Beyond høreapparaterne er forbundet til telefon, så er du klar til at kunne bruge Beyond app'en.

1. Gå ind i 'Beyond' app'en

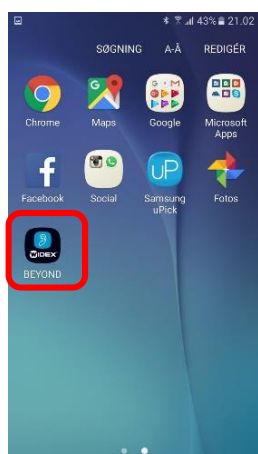

2. App'en begynder automatisk at søge efter dine høreapparater

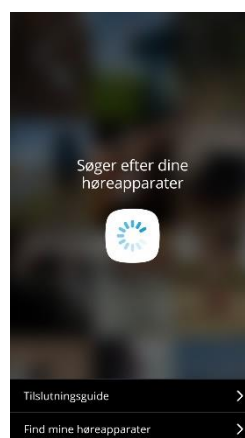

3. Når app'en har registreret dine høreapparater er du klar til at bruge app'en.

