

WIDEX BEYOND TILSLUTNINGSGUIDE TIL iPhone


KONTROLLÉR SOFTWARE VERSION

For at være kompatibel med Beyond app'en og Beyond høreapparaterne skal softwaren på din iPhone være **iOS 10.0 eller højere**.


Det kan du nemt tjekke ved at følge disse 4 enkle trin.

Vær i øvrigt opmærksom på, at 'location' skal være aktiveret på din telefon, for at app'en kan fungere.


1. Gå ind i 'Indstillinger'

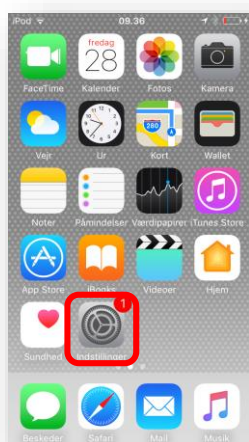


2. Tryk på menupunktet 'Generelt'

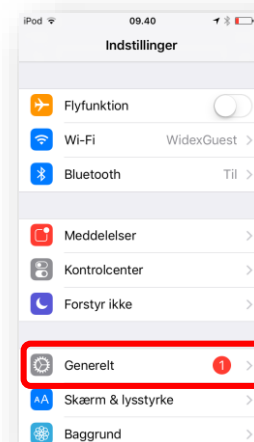

3. Tryk på menupunktet 'Om'

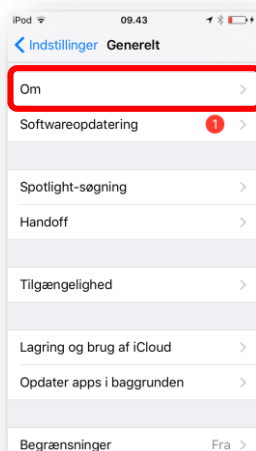

4. Tjek tallet efter 'Version' Der skal stå **iOS 10.0 eller højere**

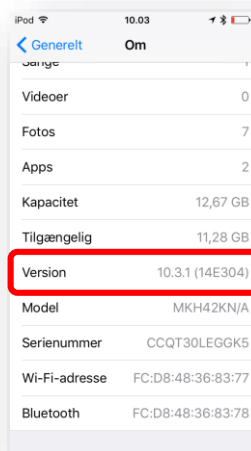


WIDEX BEYOND TILSLUTNINGSGUIDE TIL iPhone


FORBIND DINE BEYOND HØREAPPARATER VIA BLUETOOTH

Inden du kan gå videre med at bruge Beyond app'en skal du sørge for at forbinde/parre dine høreapparater med telefonen via Bluetooth signalet.


1. Gå ind i 'Indstillinger'

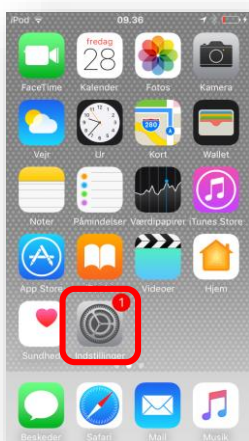


2. Sørg først for at Bluetooth er slået til

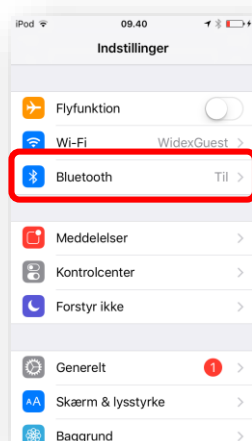

3. Tryk på menupunktet 'Generelt'

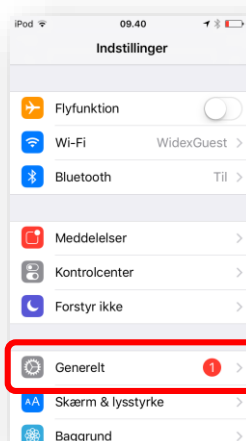


4. Tryk på menupunktet 'Tilgængelighed'

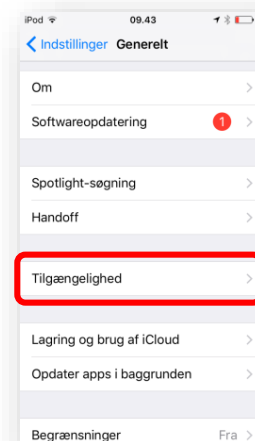


5. Tryk på menupunktet 'Høreapparater'




6. Under 'Enheder' bør du nu kunne se et H+V Beyond høreapparat. For at forbinde/parre skal du trykke på feltet.

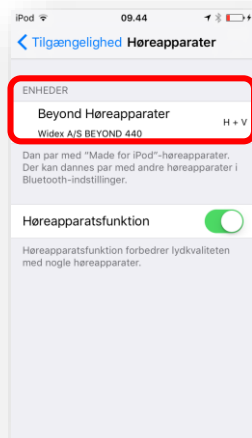

7. Her vil du få en anmodning om at danne par. Vær OBS på at dette skal ske 2 gange - 1 gang pr. apparat

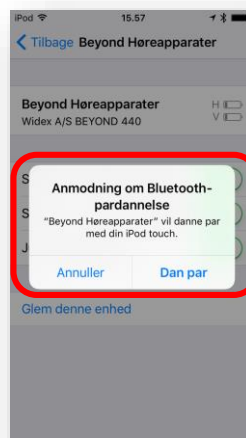

8. Når parringen er lykket kan du se H+V apparaterne med batteristatus.

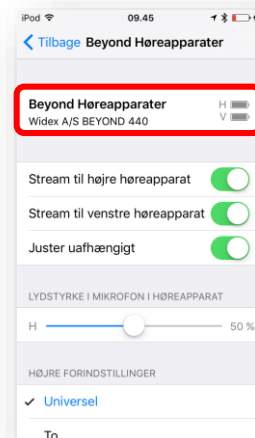


WIDEX BEYOND TILSLUTNINGSGUIDE TIL iPhone


KOM I GANG MED BEYOND APP'EN

Når softwaren er opdateret og Beyond høreapparaterne er forbundet til telefon, så er du klar til at kunne bruge Beyond app'en.

1. Gå ind i 'Beyond' app'en

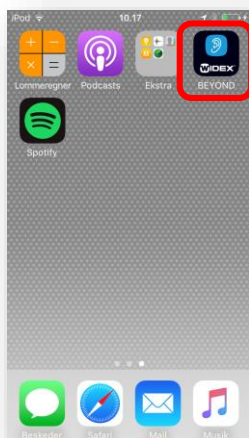

2. App'en begynder automatisk at søge efter dine høreapparater

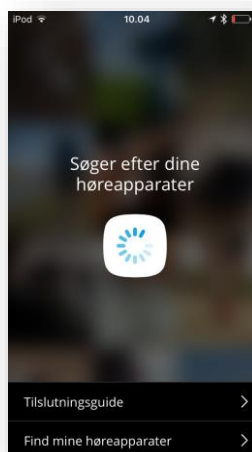

3. Når app'en har registreret dine høreapparater er du klar til at bruge app'en.

